

## Gebrauchsanweisung

*Beruhigt und lindert  
gereizte Augen.*

**Zur besseren Befeuchtung der Augen,  
insbesondere beim Tragen von  
Kontaktlinsen.**

# Herba-Vision®

## Augentrost

Benetzungslösung für das Auge mit 0,05 % Augentrosttinktur, hergestellt gemäß HAB 2000.

Herba-Vision Augentropfen Augentrost revitalisieren und erfrischen müde Augen, befeuchten empfindliche Augen. Sie bringen Linderung bei belasteten und überanstrengten Augen verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, den Aufenthalt in verräucherten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

### Zusammensetzung:

1 ml isotonische Pufferlösung enthält  
0,5 mg Augentrosttinktur (HAB 2000)  
0,001 mg Polyhexanid  
0,1 mg EDTA  
3 mg HPMC (Methocel®)

Medizinprodukt  
CE 0473

### Anwendung:

Bei Bedarf 1–2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

### Hinweise:

Kühl und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Öffnen zwei Monate haltbar.

### Vorsichtsmassnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Tropferspitze nicht berühren. Nach Gebrauch verschliessen. Immer frische Lösung verwenden. Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren. Bei anhaltenden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

### Stand der Information:

März 2004



OmniVision GmbH  
Lindberghstrasse 7  
D-82178 Puchheim  
[www.omnivision-pharma.com](http://www.omnivision-pharma.com)