

## Gebrauchsanweisung

### *Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure – natürliche Befeuchtung: wohltuend und lang anhaltend.*

# Hylo-Vision® sine

(Natriumhyaluronat 0,10 %)

#### Benetzende Augentropfen zur Anwendung mit allen Kontaktlinsen

**Beschreibung:** Hylo-Vision® sine ist ein steriles konservierungsmittelfreies Benetzungsmittel. Es ist zur Benetzung von Kontaktlinsen jeder Art geeignet. Hylo-Vision® sine enthält Hyaluronat, eine natürliche Substanz, die auch in Strukturen des menschlichen Auges und im Tränenfilm vorhanden ist. Hylo-Vision® sine ist dadurch gut verträglich. Es schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es eine lang anhaltende Linderung der Symptome Trockenheit, Reizungen und leichte Irritationen, die im Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. durch das Tragen von harten oder weichen Kontaktlinsen oder durch diagnostische Eingriffe am Auge,
- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch oder
- bei Müdigkeit und Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder langen Autofahrten auftreten.

**Anwendung:** Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis vom Riegel ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge. Achten Sie bitte darauf, Ihre Augen mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht zu berühren. Alternativ, wenn die Tropfen in Verbindung mit Kontaktlinsen angewendet werden, bringen Sie ein oder zwei Tropfen auf jede Kontaktlinse auf, bevor Sie sie in Ihre Augen setzen, anstatt die Tropfen direkt in Ihre Augen zu geben. Nur für den äußerlichen Gebrauch.

**Zusammensetzung:** Natriumhyaluronat (0,10%), Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

**Packungsgröße:** Verkaufseinheit: Ein-Dosis-Behältnisse, 20 x 0,4 ml

#### Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren, um Infektionen oder Verletzungen des Auges zu vermeiden.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da Hylo-Vision® sine keine Konservierungsmittel enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen, sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand bestehen.
- Nicht anwenden bei einem Verdacht auf eine Augeninfektion oder bei einer bestehenden Augeninfektion.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.  
Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.
- Wenn Ihre Beschwerden während der Anwendung von Hylo-Vision® sine anhalten, suchen Sie bitte Ihren Augenarzt auf.


**Lagerung:** Bei 2° C bis 25° C lagern. Vor Frost schützen.  
Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

**Stand der Gebrauchsinformation:** September 2007

Hersteller:

OmniVision GmbH, Lindberghstraße 7, 82178 Puchheim  
www.omnivision-pharma.com, info@omnivision-pharma.com

03G-DE-01

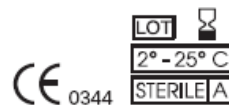

23253501/23254301

