

Gebrauchsanweisung

Spült und erfrischt müde, strapazierte Augen.

Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von Kontaktlinsen.

Herba-Vision® Augenbad

Augentrost (Euphrasia) & Hyaluronat

Benetzungslösung für das Auge mit Augentrosttinktur, hergestellt gemäß HAB 2000 sowie mit natürlichem Hyaluronat.

Herba-Vision® Augenbad revitalisiert müde Augen, befeuchtet empfindliche Augen und lindert belastete Augen, die durch Computerarbeit, Umwelteinflüsse oder durch das Tragen von Kontaktlinsen gereizt sind.

Die besondere, natürliche Formulierung mit dem Extrakt aus Augentrost (Euphrasia) und mit befeuchtendem Hyaluronat wirkt sanft und wohltuend bei gereizten Augen.

Zusammensetzung: 1 ml isotonische gepufferte Kochsalzlösung enthält:
0,5 mg Augentrosttinktur (HAB 2000)
0,4 mg Hypromellose (Methocel®*)
0,1 mg Natrium-Hyaluronat
0,0015 mg Polyhexanid
0,1 mg Natriumedetat

Anwendung:

Den Augenbadbehälter mit Herba-Vision® Augenbad auffüllen und das Auge darin baden. Die Flasche nach Gebrauch wieder schließen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

Hinweise:

Kühl und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Öffnen zwei Monate haltbar. Nicht nach Überschreiten des Verfalldatums anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Tropferspitze nicht berühren. Nach Gebrauch verschließen. Immer frische Lösung verwenden. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

Medizinprodukt
CE 0473

Optimiert
mit natürlichem
Hyaluronat

Stand der Information: April 2010

*Methocel® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Chemical Company



OmniVision GmbH
Lindberghstraße 7
D-82178 Puchheim



Herba-Vision® – natürlich mild am Auge.®

REF 879/00

