

## Gebrauchsanweisung

***Beruhigt und lindert gereizte Augen.***

**Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen.**

# Herba-Vision®

## Augentrost (Euphrasia)

mit Hyaluronat

15 ml Augentropfen (Musterpackung: 5 ml)

Benetzungslösung für das Auge mit 0,05 % Augentrosttinktur, hergestellt gemäß HAB 2000, und mit der körpereigenen benetzenden Substanz Natrium-Hyaluronat.

Herba-Vision® Augentrost Augentropfen bringen Linderung und beruhigen bei gereizten Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, den Aufenthalt in verräuchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

### Zusammensetzung:

1 ml isotonische Pufferlösung enthält  
0,5 mg Natrium-Hyaluronat  
0,5 mg Augentrosttinktur (HAB 2000)  
0,001 mg Polyhexanid  
0,1 mg EDTA  
2,5 mg HPMC (Methocel®)

Medizinprodukt  
CE 0473

### Anwendung:

Bei Bedarf 1–2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

### Hinweise:

Kühl und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Öffnen zwei Monate haltbar. Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden.

### Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Tropferspitze nicht berühren. Nach Gebrauch verschließen. Immer frische Lösung verwenden. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden Beschwerden einen Facharzt/ Spezialisten aufsuchen.

### Stand der Information:

September 2009



OmniVision GmbH  
Lindberghstraße 7  
D-82178 Puchheim

REF 806/00