

Gebrauchsanweisung

*Spült und erfrischt müde,
strapazierte Augen.*

Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von Kontaktlinsen.

Herba-Vision®

Augenbad

Kamille & Augentrost

Benetzungslösung für das Auge mit 0,05% Kamillentinktur und 0,05% Augentrosttinktur, hergestellt gemäß HAB 2000.

Herba-Vision® Augenbad revitalisiert müde Augen, befeuchtet empfindliche Augen und lindert belastete Augen, die durch Computerarbeit, Umwelteinflüsse oder durch das Tragen von Kontaktlinsen gereizt sind.

Die besondere, natürliche Formulierung mit Extrakten aus Kamille und Augentrost wirkt sanft und wohltuend bei empfindlichen Augen.

Zusammensetzung:

1 ml isotonische Pufferlösung enthält
0,5 mg Kamillentinktur (HAB 2000)
0,5 mg Augentrosttinktur (HAB 2000)
0,001 mg Polyhexanid, 0,1 mg EDTA
0,5 mg HPMC (Methocel®)

Medizinprodukt
CE 0473

Anwendung:

Den Augenbadbehälter mit Herba-Vision® Augenbad auffüllen und das Auge darin baden. Das Behältnis nach Gebrauch wieder schließen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

Hinweise:

Kühl und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Öffnen zwei Monate haltbar. Nicht nach Überschreiten des Verfalldatums anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Tropferspitze nicht berühren. Nach Gebrauch verschließen. Immer frische Lösung verwenden. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

Stand der Information:

Juni 2004



OmniVision GmbH
Lindberghstrasse 7
D-82178 Puchheim